


## actim FECAL BLOOD

## أكتيم / الدم في الغائط

الأنواع: Cat 30371ETAC, Cat 30372ETAC, Cat 30331ETAC

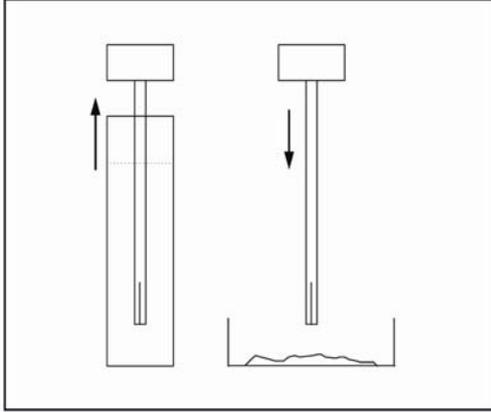


الصورة 1

1. خذ بعضاً من الغائط على ورقة تواليت أو في حاوية (تستخدم لمرة واحدة).

2. افتح العلبة التي تحتوي الدارئة (السائل). خذ عينة الغائط بواسطة العود المثبت في السداة. أدخل العود وأدره في أماكن مختلفة من الغائط بحيث يمتلئ التلمن الموجودان في طرف العود (الصورة 1).

3. أزل الفائض من الغائط من خلال مسح العود بورق التواليت. تكون كمية عينة الغائط كافية عندما يمتلئ كلا التلمين في طرف العود (الصورة 2).

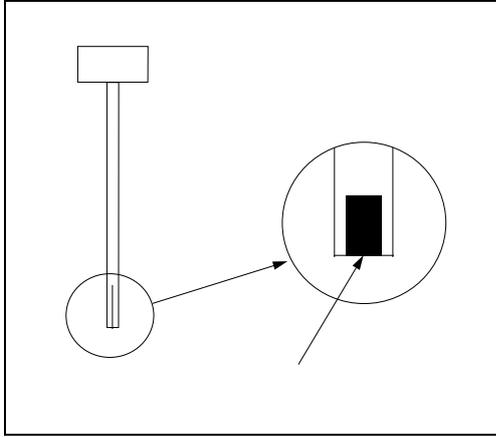


الصورة 2

إذا كانت كمية العينة أكبر من اللازم فإن ذلك يزيد من صعوبة إجراء الفحص.

4. أعد السداة والعود إلى مكانها في العلبة وأغلقها بإحكام. ثم رجّ العلبة بعد ذلك حتى يختلط الغائط بسائل الدارئة (الصورة 3).

5. أرسل العلبة بأسرع ما يمكن إلى المختبر لإجراء الفحص. ينبغي فحص العينة في غضون أسبوع واحد بعد أخذ العينة. بعد أخذ العينة يمكن الاحتفاظ بالعلبة في درجة حرارة الغرفة أو في البرد (2-8 درجات مئوية).

إذا كانت هناك حاجة لعدة عينات من الغائط فيجب أن تؤخذ في أيام مختلفة.

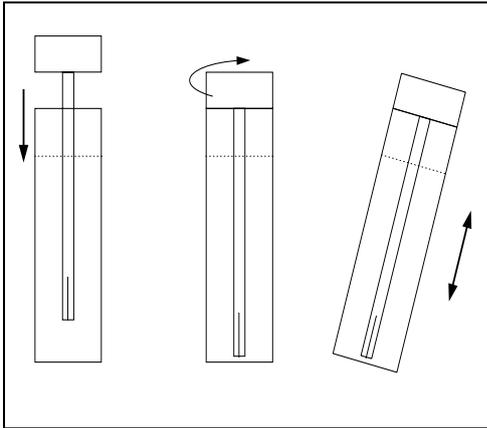

الصورة 3

### ملاحظة!

لا يجوز تناول سائل الدارئة. يحتوي على نترات الصوديوم  $\text{NaNO}_3$  كمادة حافظة،  $> 0.1\%$ . لا ينبغي على النساء في سن الخصوبة أن يأخذن هذه العينات أثناء الدورة الشهرية.

الموزع:

أوريون دياغنوستيكا ش.م. / Orion Diagnostica AB  
، فاكس: 08-623 64 40

شركة ميديكس بيوكيميكا أوي ش.م.

MEDIX BIOCHEMICA OY AB/

غرانكوللا، فنلندا / Grankulla Finland